

フットビューSAM をインストールする場合、次の事項に注意してください。

■既にフットビューまたはフットビュークリニックがインストールされているコンピュータにインストールする場合

フットビュークリニックとフットビュー、フットビューSAM は、同じ名称のデータベースを使用する設計になっています。よって、フットビュー（フットビュークリニック）がインストールされている状態でフットビューSAM をインストールすると、新しくインストールしたデータベースがアクティブとなり、もとのフットビュー（フットビュークリニック）から以前のデータベースにアクセスすることができなくなります。

この現象を回避する方法を以下に示します。

（ここではフットビューがインストールされた環境にフットビューSAM をインストールした場合の例を示します）

#### 1. フットビューのデータをバックアップ

標準のインストールを行った場合、

**C:\¥Nitta¥Footview\_E3**

のフォルダ（フォルダ名、バージョン表示は異なることがあります）に「database」フォルダがあります。

これを任意のフォルダにバックアップしてください。

#### 2. フットビューのアンインストール

コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」により、フットビューをアンインストールしてください。

#### 3. フットビューSAM のインストール

フットビューSAM をインストールしてください。

インストールの方法はインストールマニュアルを参照してください。

#### 4. データの移動

標準のインストールを行った場合、

**C:\Nitta¥FootviewSAMxxx**

のフォルダに、1.でバックアップした「database」フォルダを移動してください。

## 5. データベース項目の変換

「database」フォルダ内の拡張子が「tst」の2つのファイルを削除し、フットビューSAMを起動してください。データベース項目は自動で変換されます。

### ■既にフットビューSAMがインストールされている場合

バージョンアップ等で、既にフットビューSAMがインストールされている場合、そのバージョンによっては正常にインストールが行えないことがあります。

また、インストール後にデータベースの参照位置が変わり、データベース機能が使用できなくなります。

この現象を回避する方法を以下に示します。

#### 1. フットビューSAMのデータをバックアップ

標準のインストールを行った場合、

**C:\¥Nitta¥FootviewSAMxxx**

のフォルダ（フォルダ名、バージョン表示は異なることがあります）に「database」フォルダがあります。

これを任意のフォルダにバックアップしてください。

#### 2. フットビューSAM（旧バージョン）のアンインストール

コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」により、フットビューSAMをアンインストールしてください。

#### 3. フットビューSAM（新バージョン）のインストール

フットビュークリニックをインストールしてください。

インストールの方法はインストールマニュアルを参照してください。

#### 4. データの移動

標準のインストールを行った場合、

**C:\¥Nitta¥FootviewSAMxxx**

のフォルダに、1.でバックアップした「database」フォルダを移動してください。